

Guia de seleção de lentes Proclear® 1 day multifocal

Pacientes diferentes. Um processo de seleção de lentes simples.

Seleção de lentes simples com base numa abordagem única.

- Desenho esférico de centro-perto
- Concebida com um único perfil de potência
 - Preserva a visão ao longe sem compromisso visual
- Estímulo de perto no olho não dominante
 - Otimiza a visão ao perto e intermédia e mantém a binocularidade
 - Adapte pacientes até +2,50 ADD
- Em geral, uma experiência visual mais natural

Guia de seleção de lentes

Passo 1 Confirme a refração e determine a dominância sensorial.

Passo 2 Olho dominante: Escolha uma lente com a distância Rx apropriada.
Olho não dominante: Escolha uma lente com a potência de “estímulo de perto” recomendada adicionada à distância Rx, de acordo com as necessidades de ADD do paciente:

Add do paciente	Potência da lente a pedir
até +1,00	Adicionar +0,50 à refração de longe do paciente
+1,25 a +2,50	Adicionar +0,50 à potência de longe do Olho Dominante Adicionar +1,25 à potência de longe do Olho Não Dominante

Exemplo de refração: -2,00 AO com Add +1,75

Rx Lente Proclear 1 day multifocal


Olho dominante	Olho não dominante
-1,50	-0,75

Passo 3 Deixe as lentes estabilizar antes de avaliar a visão. Se o paciente estiver satisfeito com a visão pode prescrever.

Sugestões de otimização

Para melhorar a visão ao longe, faça uma sobre refração em passos de +/- 0,25 D ao olho dominante em condições binoculares. Muitos profissionais concluíram que adicionar +0,25 D ao olho dominante no Passo 2 melhora a visão ao longe.

Para melhorar a visão ao perto, efetue uma sobre refração em passos de +/- 0,25 D ao olho não dominante em condições binoculares.

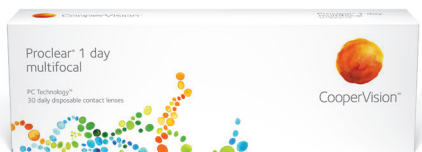

Uma abordagem inovadora. Mais razões para escolher a Proclear.

Melhora a visão ao perto sem perturbar a visão ao longe.

- Facilidade de adaptação para utilizadores de lentes, à medida que avançam pelas diferentes fases da presbiopia.
—Concebida com um único perfil de potência
—Visão ao longe menos comprometida
- O desenho da lente contribui para uma experiência de adaptação de lentes simplificada
—Reduz o tempo de consulta e minimiza as consultas de seguimento
- Ampla e eficiente gama de parâmetros
- Primeira abordagem para satisfazer as necessidades de visão do utilizador de diárias

Pacientes diferentes. Uma Proclear.

Trata os dois olhos separadamente enquanto mantém a binocularidade

- Utiliza potências diferentes em cada olho para melhorar a visão ao perto enquanto minimiza o compromisso da visão ao longe
- Envia sinais não comprometidos separados para cada olho, permitindo ao cérebro produzir uma imagem mais pura

Uma melhoria significativa em relação à monovisão

- Mantém a binocularidade mesmo com ADDs mais altas para proporcionar um desempenho visual superior à monovisão
- Melhora a estereopsia, a visão intermédia e a visão noturna
- Verdadeiro desenho de lente multifocal

Especificações do produto

Lente Proclear 1 day multifocal

Potência	+6,00 a -10,00 (0,25 passos; 0,50 passos após -6,00)
ADD	Concebida com um único perfil de potência
Curva base	8,7 mm
Diâmetro	14,2 mm

